

# osom

## Mono Test

MediGroup  
Kajerødgade 38  
3460 Birkerød  
Danmark




45 76 54 25  
info@medigroup.dk



### Tilsætning af prøve:

1

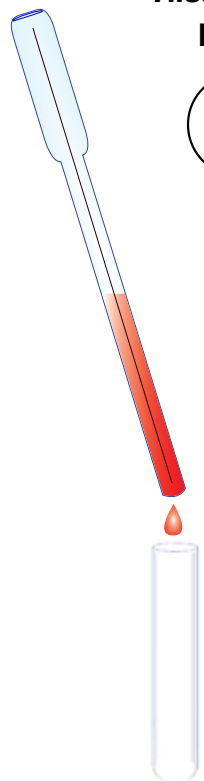

#### 1 Dråbe

fingerspidsblod i glas.  
Efter fyldning af et  
kapillærrør fra ende til  
anden, dispenseres alt  
blodet i prøveglasset

**1 Dråbe**  
fuldblodsprøver i glas:  
Anvend den medfølgende  
overførselspipette, og tilsæt  
én dråbe til prøveglasset

### Tilsætning af fortyndingsmiddel:

2



#### 1 dråbe fortynder

Tilsæt langsomt en dråbe  
fortynder til bunden af  
prøveglasset og bland.

### Aflæs resultatet:

3



#### 5 minutter

Anbring den absorber-  
ende ende af teststick'en  
i prøven og aflæs resul-  
tatet efter 5 minutter.

### Tolkning af testresultat:

4



#### Positivt +

En blå kontrollinje  
OG en rød  
testlinje.



#### Negativt -

En blå kontrollinje  
men ingen rød  
testlinje.