

osom[®]

RSV/Adeno Test



TIL PÅVISNING AF RSV-OG/ELLER ADENOVIRUS-ANTIGENER

EGENSKABER:

- ✓ **NØJAGTIG**; > 90 % versus PCR for RSV, 85 % versus PCR for adenovirus
- ✓ **HURTIG**; Håndtering på under 1 minut, resultater i løbet af maks. 10 minutter
- ✓ **PRØVE**; Næsepodning, næsesugning eller svælgpodning (adeno)
- ✓ **DIFFERENTIALDIAGNOSTIK**
- ✓ **OPLÆRING**; Oplæring og certificering online på: www.osomtraining.com
- ✓ **KUNDESERVICE**; Teknisk support bemandet med certificerede medicinske teknikere




TESTPROCEDURE/RESULTATER




Føj ekstraktionsbuffer til testrøret.


Føj prøvpinden til røret, og bland grundigt.

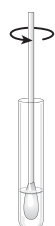


Anbring testpinden i testrøret.

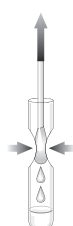

Tryk på siden af røret for at presse væske ud.

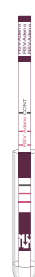

Aflæs resultater efter 10 MINUTTER.

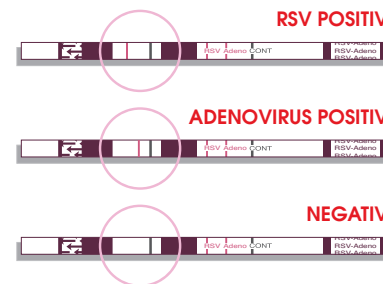

BESKRIVELSE	KONFIGURATION	KATALOGNR	OPBEVARING
OSOM [®] RSV/ADENO TEST OSOM [®] RSV/ADENO CONTROL KIT	25 TESTS	197E (CE MARKED) 198E (CE MARKED)	STUETEMPERATUR STUETEMPERATUR

KUN TIL EKSPORT. IKKE TIL SALG I USA

SEKISUI

INTERNATIONAL
Sekisui Diagnostics (UK) Limited
50 Gibson Drive
Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4AF, UK
Phone: +44 (0) 1732 220022
Fax: +44 (0) 1732 220024
Email: info@sekisui-dx.com
ISO 9001 Certified, ISO 13485 Certified

OSOM[®] is a registered U.S. trademark of Sekisui Diagnostics, LLC.
©2013 Sekisui Diagnostics, LLC – All rights reserved.

SKANDINAVIEN:
MediGroup Aps
Kajserødsgade 38
DK-3460 Birkerød
Tlf: + 45 4576 5425
Email: info@medigroup.dk



1463-0, 08/13